

LIBRERÍAS SMART




INSTRUCCIONES

1. CÓMO DESCARGAR LAS LIBRERÍA SMART PARA 3shape


2. IMPORTAR LIBRERÍA SMART PARA 3shape

1. CÓMO DESCARGAR LAS LIBRERÍAS PARA 3shape

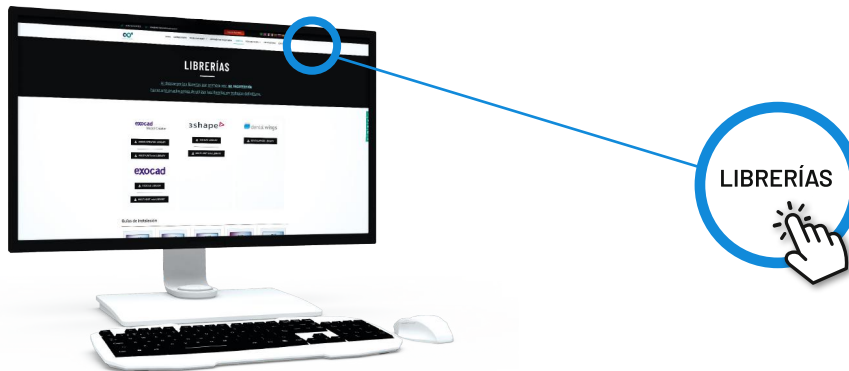


PASO 1

1. Desde un ordenador, conectarse a: www.smartimplantsolutions.com
2. En el menú principal, pinche en el botón **LIBRERÍAS**

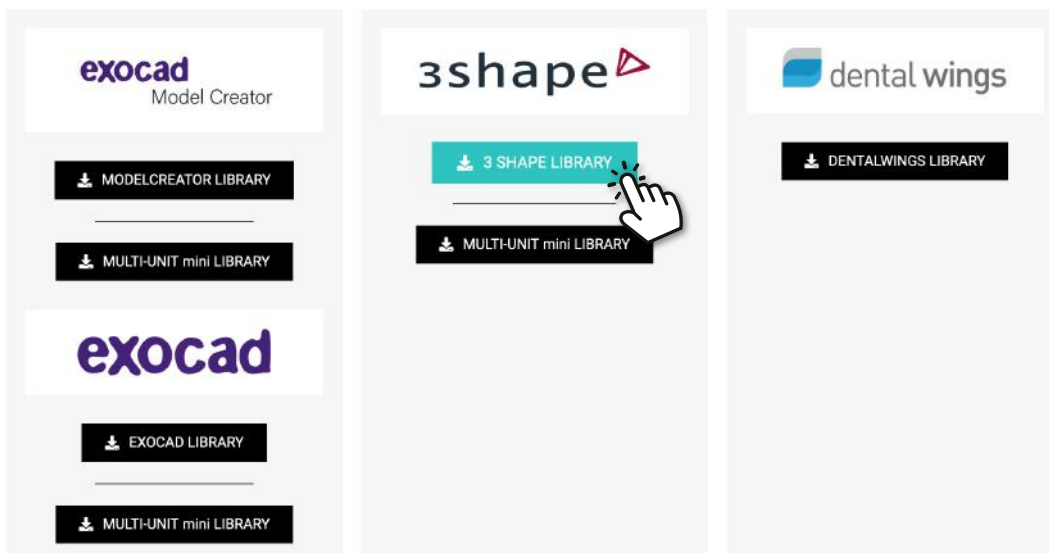

PASO 2

1. Pinche en el botón de la librería a descargar.
Este enlace te dirige a la página de descargas **DROPBOX**.

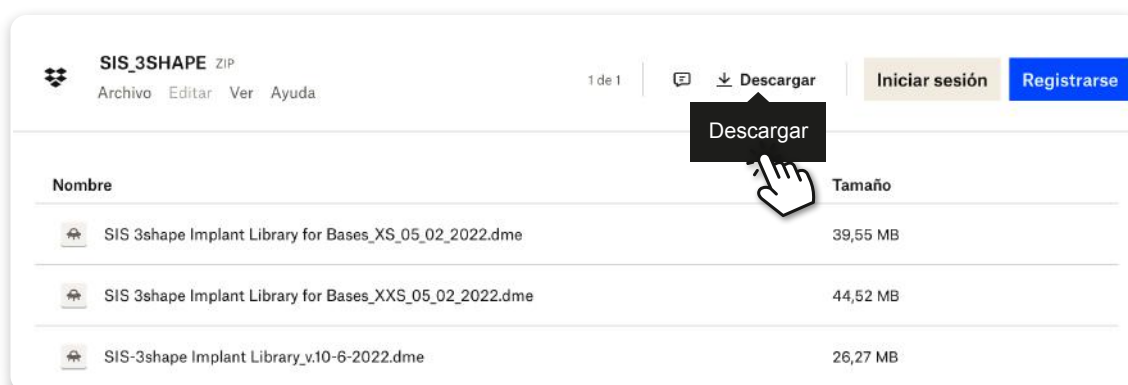

PASO 3


En DROPBOX:

1. Pulse el botón **DESCARGAR**.
Se descargará el archivo en la carpeta Descargas de su PC.

2. IMPORTAR LIBRERÍA SMART PARA 3shape

DESCOMPRESIR ARCHIVO.ZIP

1. Vaya a la carpeta Descargas de su PC.
2. Descomprima el archivo descargado.

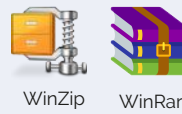


Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como WinZip o WinRAR.


Abrir Control Panel



Aparece la siguiente ventana.

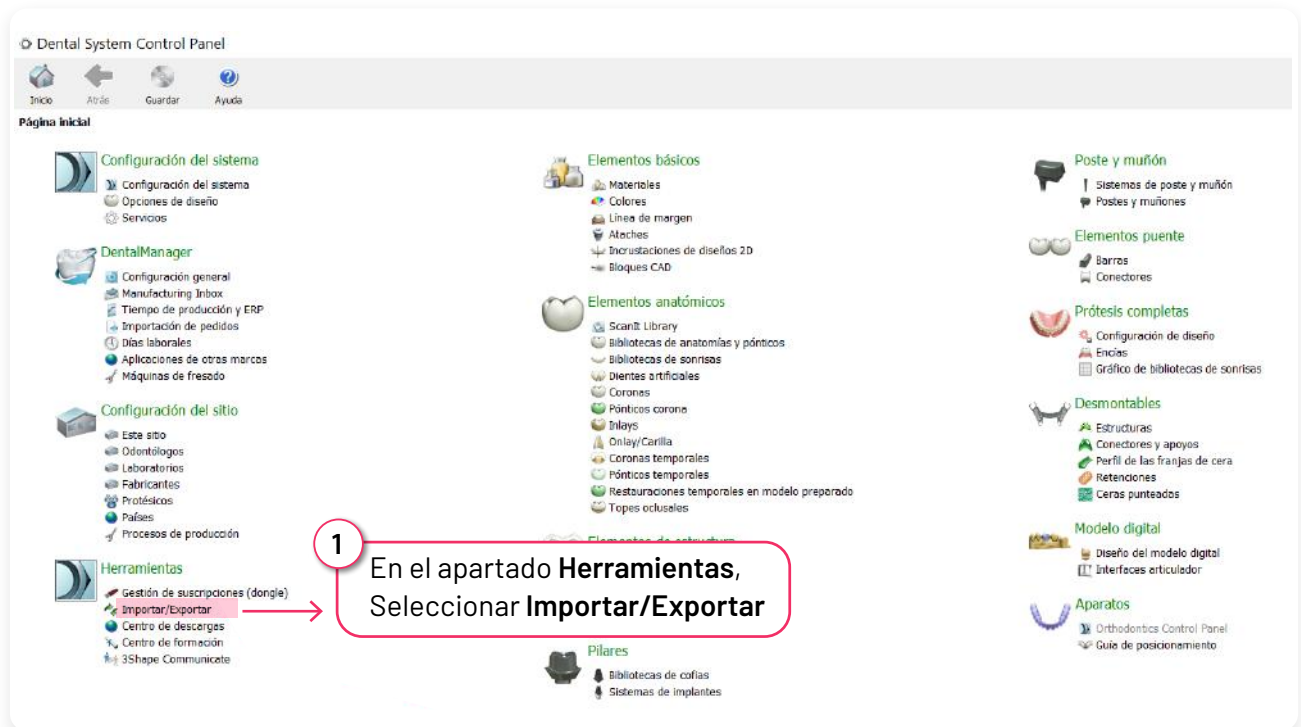


Se abre la siguiente ventana.

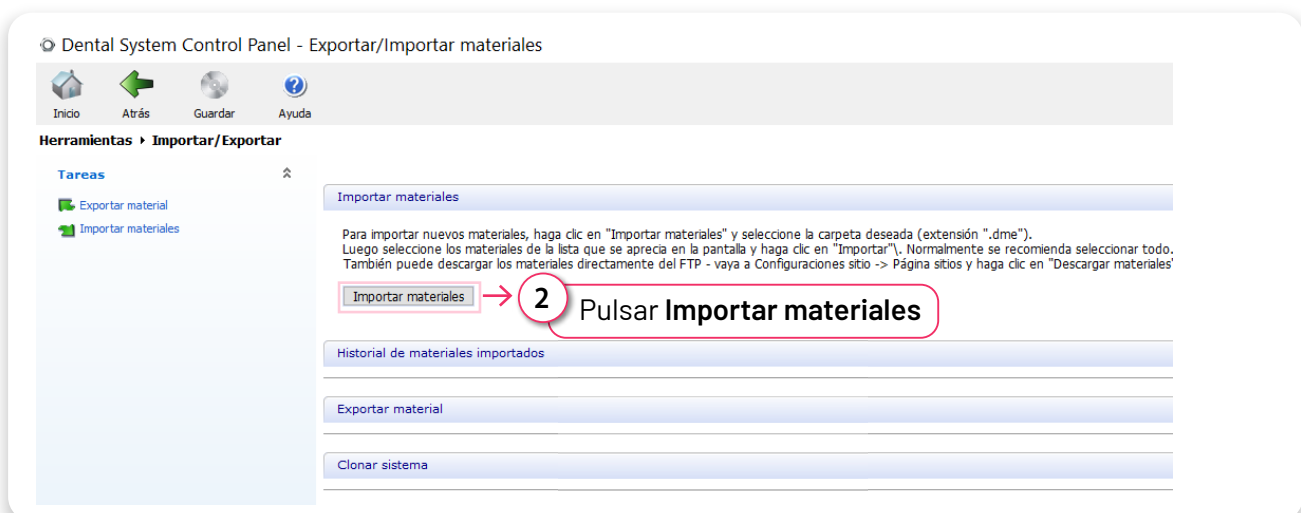


2. IMPORTAR LIBRERÍA SMART PARA 3shape

Se abre una nueva ventana.

En esta ventana **busque la ruta** donde tiene el **archivo descargado** y **seleccione dicho archivo**.

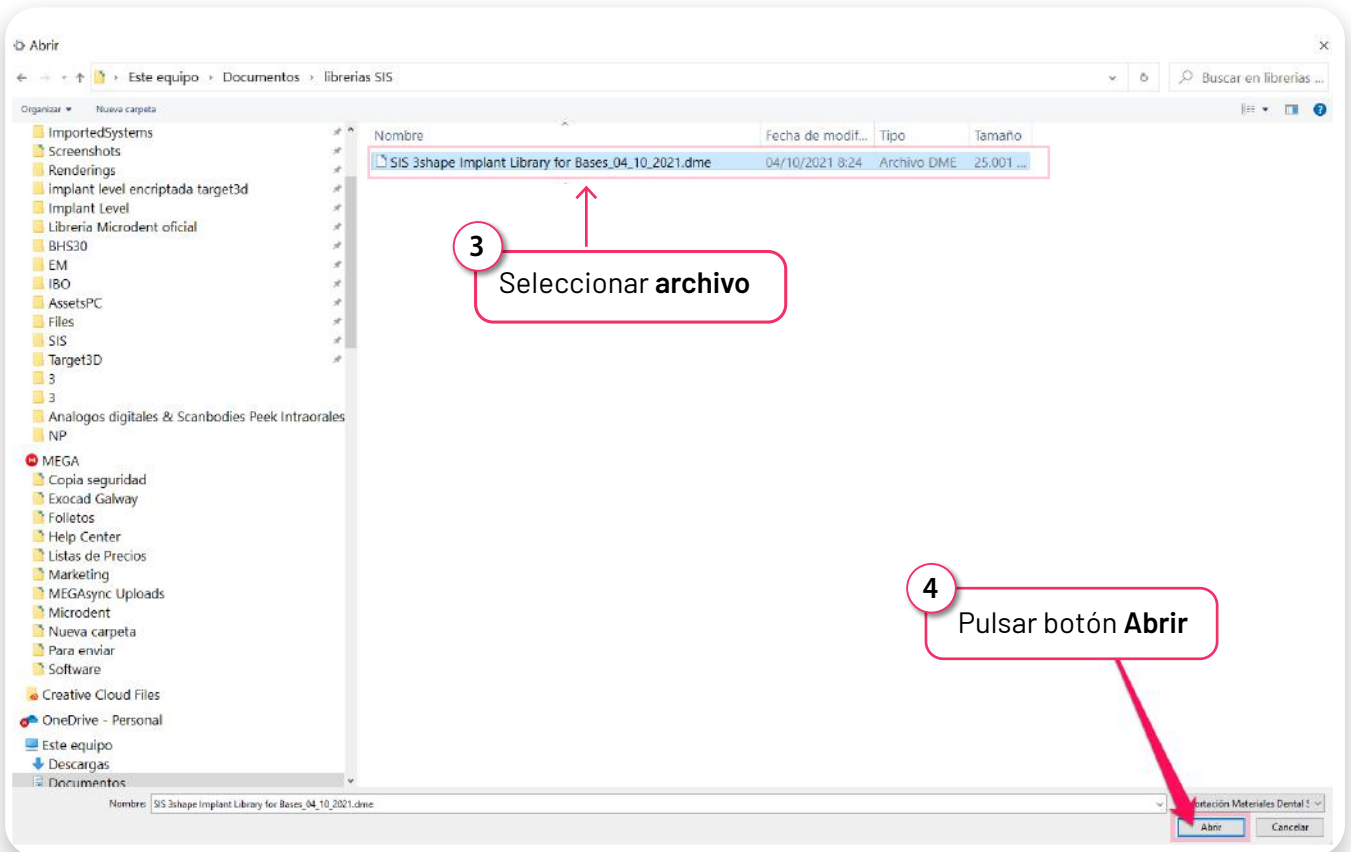

Se abre una ventana emergente.

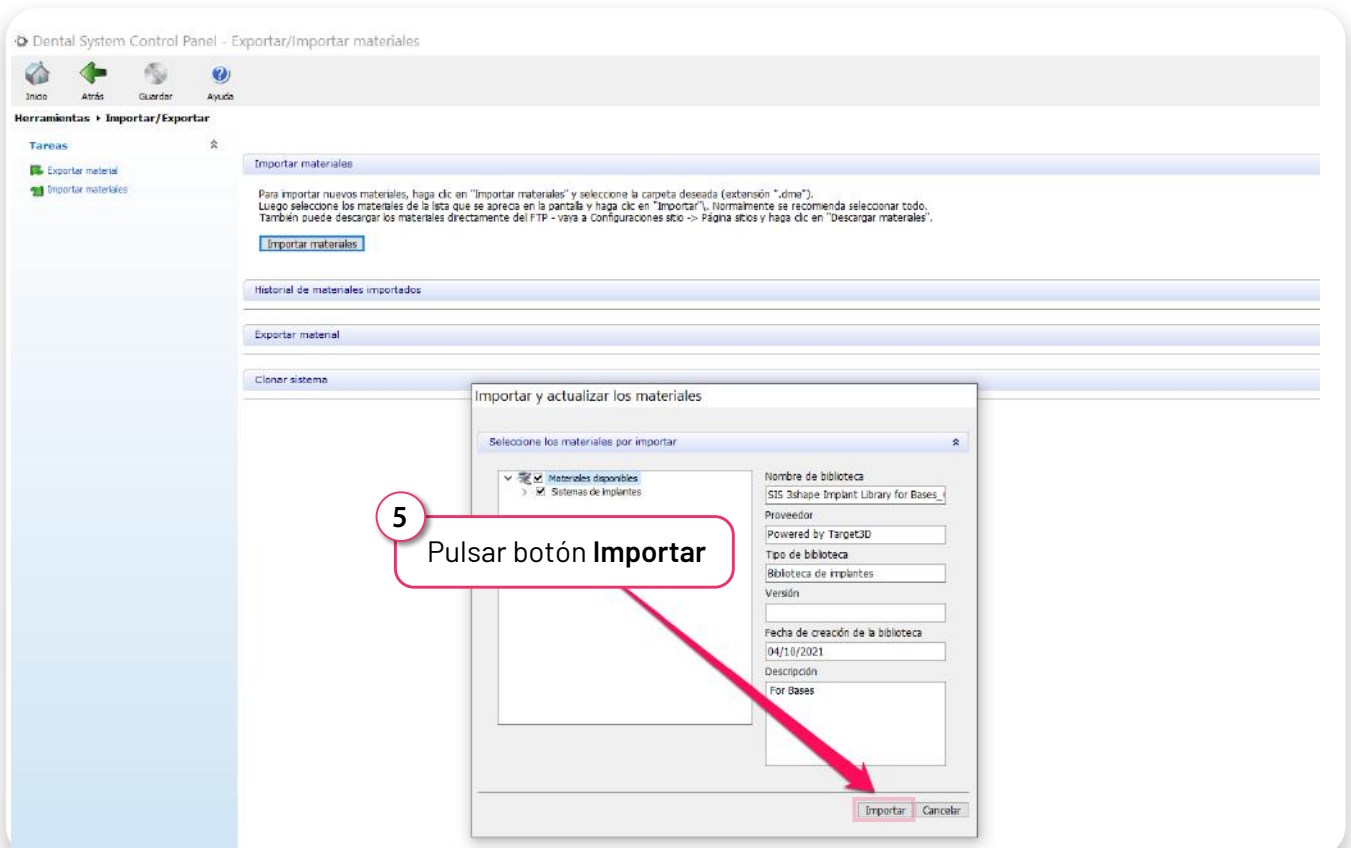

2.IMPORTAR LIBRERÍA SMART PARA 3shape

Las librerías están instaladas y listas para usar.

IMPORTANTE

Por último debe **cerrar el software** (Reiniciar el software 3Shape) **completamente para que los cambios surjan efecto.**

