

# LIBRERÍAS SMART



## INSTRUCCIONES

1. CÓMO DESCARGAR LAS LIBRERÍAS MODELCREATOR

---


2. INSTALAR LIBRERÍA MODELCREATOR

# 1. CÓMO DESCARGAR LAS LIBRERÍAS MODELCREATOR




## PASO 1

1. Desde un ordenador, conectarse a: [www.smartimplantsolutions.com](http://www.smartimplantsolutions.com)
2. En el menú principal, pinche en el botón **LIBRERÍAS**.

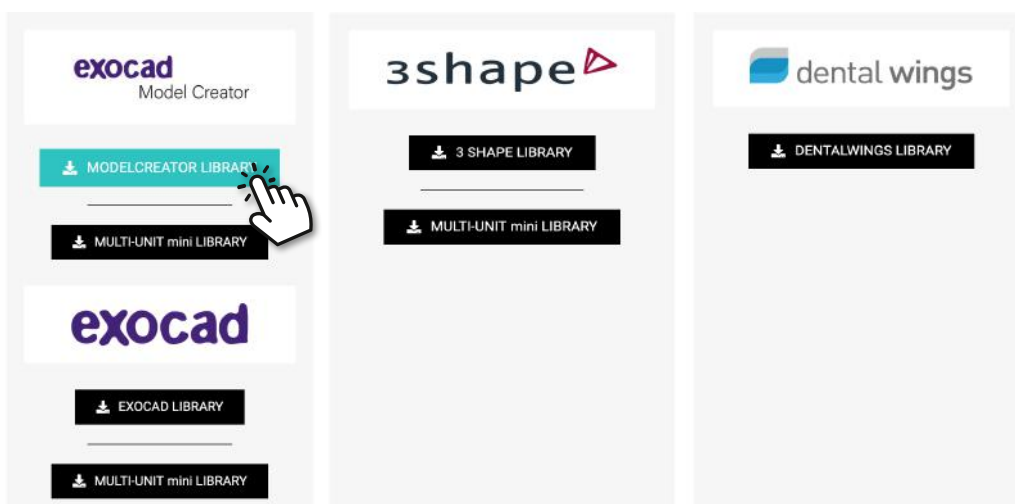

## PASO 2

1. Pinche en el botón de la librería a descargar.  
Este enlace te dirige a la página de descargas **DROPBOX**.

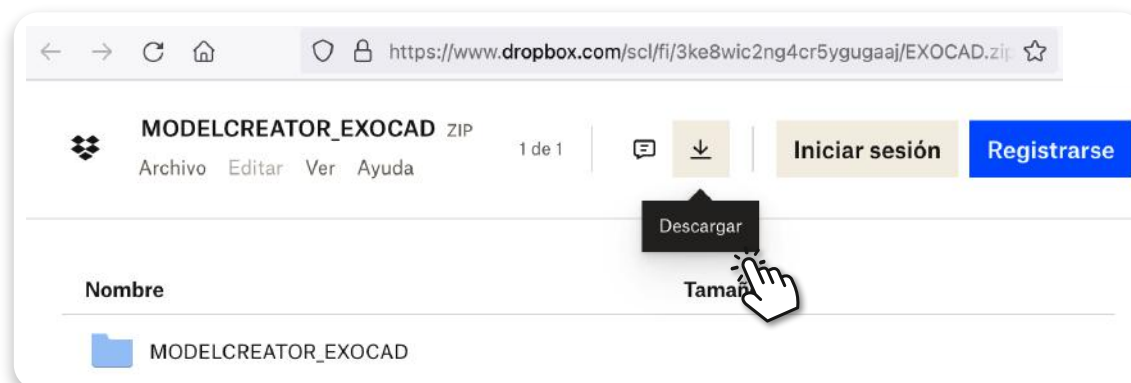

## PASO 3

### En DROPBOX:


1. Pulse el botón **DESCARGAR**.  
Se descargará el archivo en la carpeta Descargas de su PC.

## 2. INSTALAR LIBRERÍAS MODELCREATOR

### PASO 1

#### DESCOMPRESIR ARCHIVO.ZIP


1. Vaya a la carpeta Descargas de su PC.
2. Descomprima el archivo descargado.

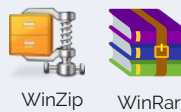

Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como WinZip o WinRAR.

### PASO 2


Cuando descomprima el archivo le saldrá una carpeta llamada "SIS\_MODELCREATOR\_LIBRARY..." que contiene:

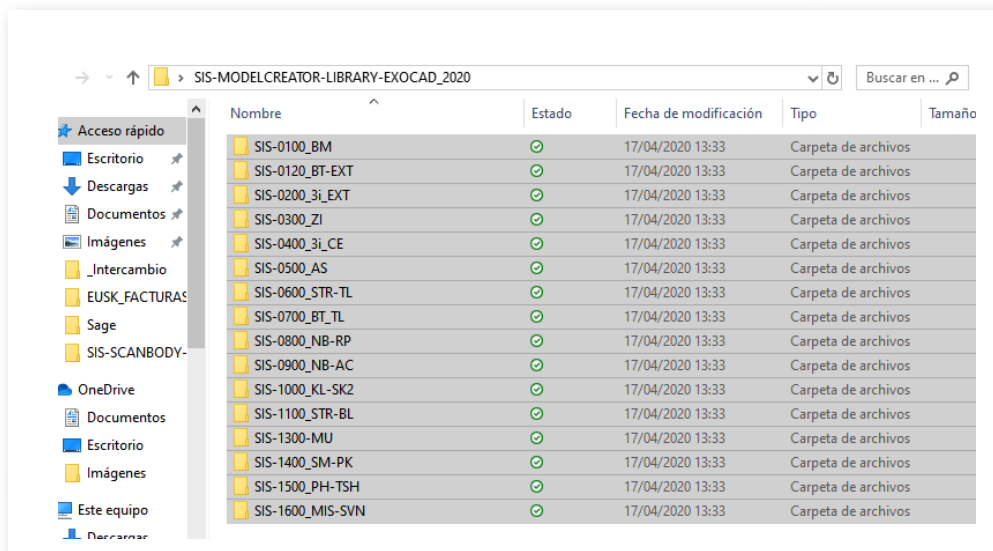

### PASO 3

#### COPIAR CARPETAS

1. Abra la carpeta "SIS\_MODELCREATOR\_LIBRARY-EXOCAD..."
2. Seleccione y copie todas las carpetas.
3. Péguelas en la siguiente ruta **C:/exocad/DentalCADApp/library/modelcreator/implants**

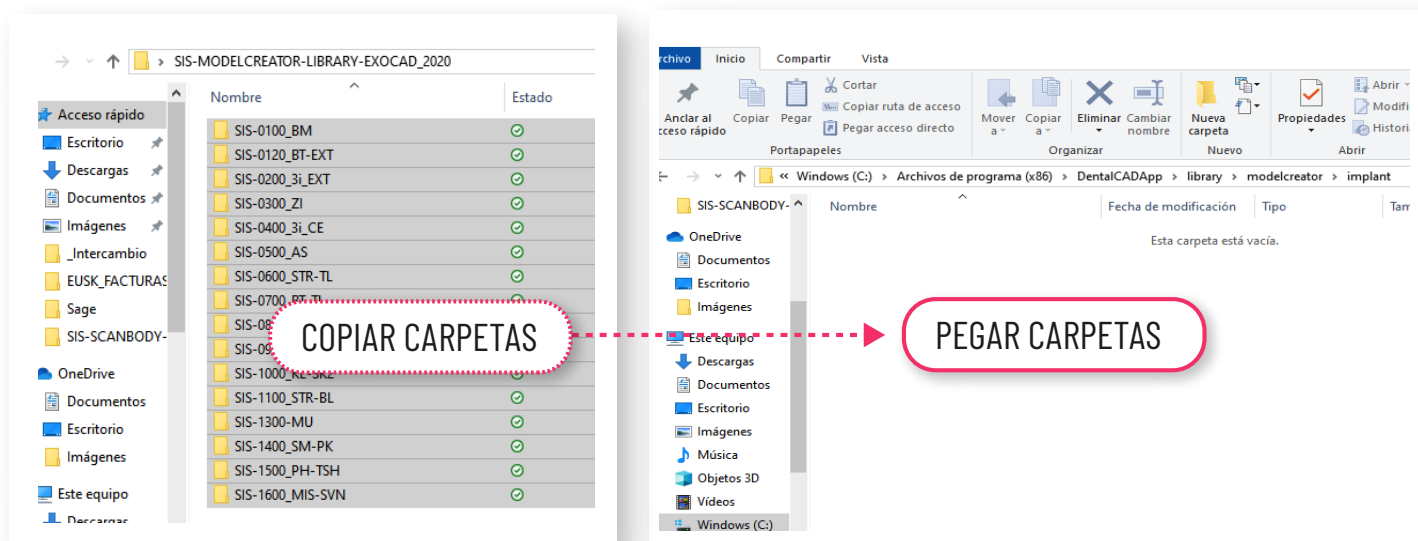

**ATAJO:** A través del navegador de archivos de su ordenador puede buscar rápidamente la ruta que se indica.

**C:/exocad/DentalCADApp/library/modelcreator/implants**

## 2.INSTALAR LIBRERÍAS MODELCREATOR

---

### PASO 4

#### COMPROBACIÓN

Asegúrese que tiene las librerías correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad.  
Entre en la **carpeta implants** y localice que estén los los archivos copiados.

### PASO 5

#### EJECUTAR EXOCAD

