


1. CÓMO DESCARGAR LAS LIBRERÍAS SMART PARA EXOCAD

PASO 1

1. Desde un ordenador, conectarse a: www.smartimplantsolutions.com
2. En el menú principal, en el botón **LIBRERÍAS**, pinche en el botón **2025 - Exocad - Smart Ti-Bases**.

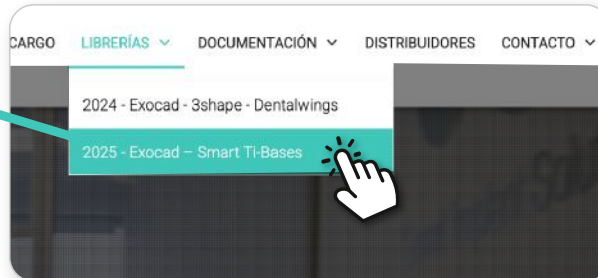

Área privada Exocad librerías Smart TI-Bases

Para acceder al área de Exocad Librerías para Smart Ti-Bases, debe introducir los siguientes datos.

Nombre *

Empresa *

Dirección *

País *

Código postal *

Cuenta de correo electrónico *


Acepto la política de privacidad

Enviar

PASO 2

- Para acceder al área de las Librerías Exocad Smart - Ti-Bases debe rellenar y enviar el formulario.
- Una vez rellenado y enviado, espere unos segundos y será dirigido automáticamente al área de las librerías 2025 - Exocad - Smart Ti-Bases.

ÁREA WEB LIBRERIAS 2025 - EXOCAD - SMART TI-BASES

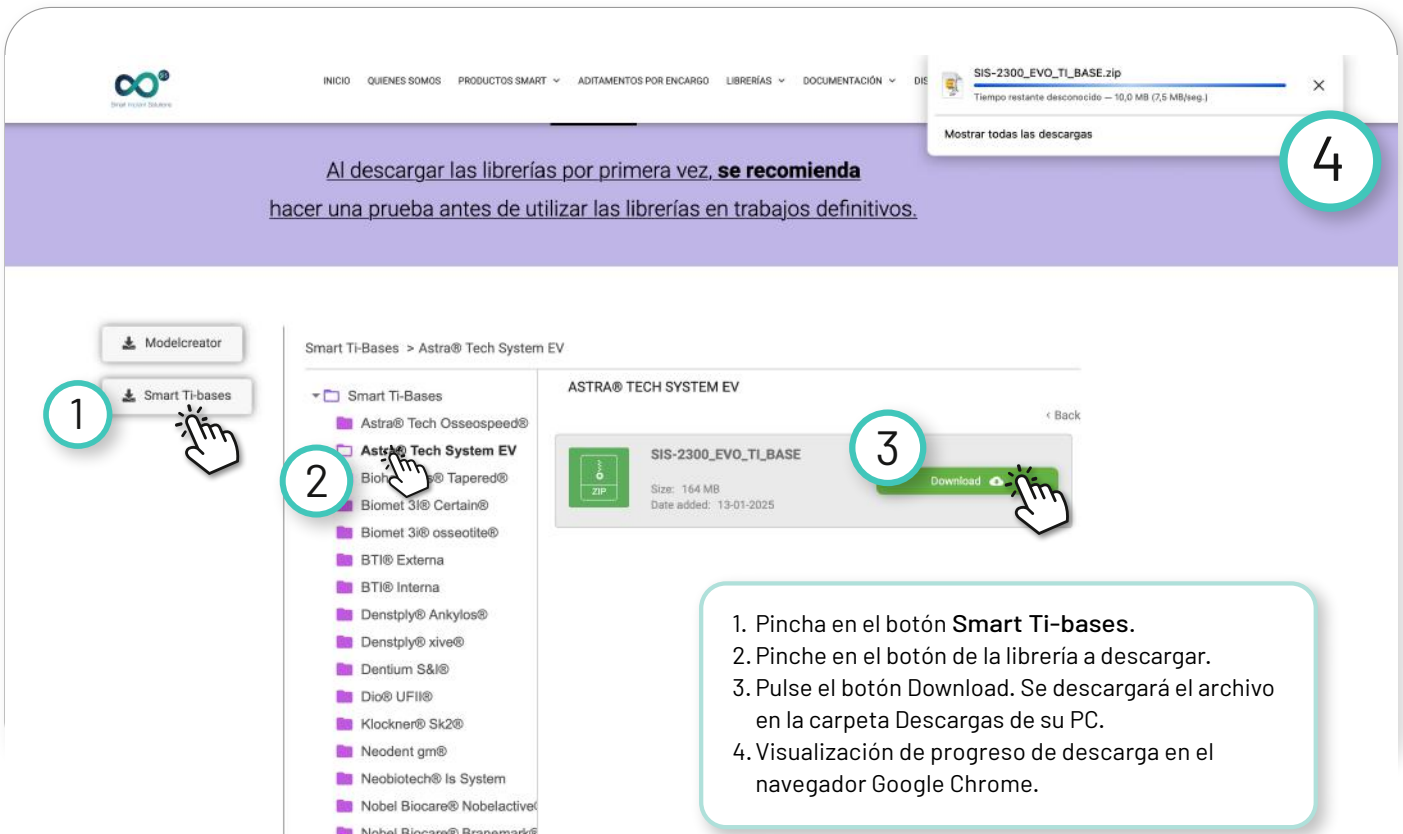

Al descargar las librerías por primera vez, **se recomienda** hacer una prueba antes de utilizar las librerías en trabajos definitivos.

1. Pincha en el botón **Smart Ti-bases**.
2. Pinche en el botón de la librería a descargar.
3. Pulse el botón **Download**. Se descargará el archivo en la carpeta Descargas de su PC.
4. Visualización de progreso de descarga en el navegador Google Chrome.

2. INSTALAR LIBRERÍAS SMART TI-BASE PARA EXOCAD



SIS-2300_EVO_TI_BASE.zip

1. **Descomprima** el archivo usando Winzip o WinRar.

Carpeta descomprimida



SIS-2300_EVO_TI_BASE

3. **Copie** la carpeta descomprimida.

4. **Péguela** en la siguiente ruta:

C:/exocad/DentalCADApp/library/implant/

Al instalar nuevas librerías, es imprescindible que el software CAD exocad esté cerrado.

Si ya existen versiones anteriores de las mismas librerías, es recomendable eliminar la carpeta correspondiente antes de pegar las nuevas para evitar conflictos.



WinZip



WinRar

UNZIP THE FILE .ZIP

To unzip the file you can use a standard zip file decompression program downloaded from the internet such as **WinZip** or **WinRar**.

ATAJO: A través del navegador de archivos de su ordenador puede buscar rápidamente la ruta que se indica.

C:/exocad/DentalCADApp/library/implant/

5. COMPROBACIÓN

Asegúrese que tiene la librería correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad.

Entre en la **carpeta implant** y localice que estén los los archivos copiados.

6. EJECUTAR EXOCAD

Ejecutar Exocad y elegir la librería Smart Ti-Base instalada.

3. INSTRUCCIONES PARA TRABAJO CON SMART Ti-BASE

PASO 1 : Selecciona la plataforma + fricción.

SIS-2300 EVO TI BASE

- ▷ 3.0 N (Scanbody SIS -2390X)
- ▷ 3.0 B (Scanbody SIS -2390X)
- ▷ 3.0 S (Scanbody SIS -2390X)
- ▷ 3.6 N (Scanbody SIS -2390R)
- ▷ 3.6 B (Scanbody SIS -2390R)
- ▷ 3.6 S (Scanbody SIS -2390R)
- ▷ 4.2 N (Scanbody SIS -2390W)
- ▷ 4.2 B (Scanbody SIS -2390W)
- ▷ 4.2 S (Scanbody SIS -2390W)
- ▷ 4.8 N (Scanbody SIS -2390L)
- ▷ 4.8 B (Scanbody SIS -2390L)
- ▷ 4.8 S (Scanbody SIS -2390L)

Indica la plataforma

Indica la referencia del Scanbody

Indica la Fricción

- S: Small** (menor espacio para cemento, más fricción).
- N: Normal** (espacio estándar para cemento).
- B: Big** (maximo espacio para cemento, menos fricción).

PASO 2 : Selecciona la referencia de tu Smart Ti-Base.

Ti-Base Estándar

SIS- 2308RR
SIS- 2308RA
SIS- 2308RRG2
SIS- 2308RAG2
SIS- 2308RAG3
SIS- 2308RRG3
SIS- 2308RRG4
SIS- 2308RAG4

Ti-Base Chimenea 7mm.

SIS- 2308RRC7
SIS- 2308RAC7
SIS-2308RRG2C7
SIS-2308RAG2C7
SIS-2308RRG3C7
SIS-2308RAG3C7
SIS-2308RRG4C7

Ti-Base Recortable

SIS-2308RRC9C3mm
SIS-2308RAC9C3mm
SIS-2308RRC9C5mm
SIS-2308RAC9C5mm
SIS-2308RRC9C7mm
SIS-2308RAC9C7mm
SIS-2308RRC9C9mm
SIS-2308RAC9C9mm



IMPORTANTE

Al instalar las librerías por primera vez, se recomienda hacer una prueba antes de utilizar las librerías en trabajos definitivos.