


## 1. CÓMO DESCARGAR LAS LIBRERÍAS SMART PARA EXOCAD MODELCREATOR

### PASO 1

1. Desde un ordenador, conectarse a: [www.smartimplantsolutions.com](http://www.smartimplantsolutions.com)
2. En el menú principal, en el botón **LIBRERÍAS**, pinche en el botón **2025 - Exocad - Smart Ti-Bases**.

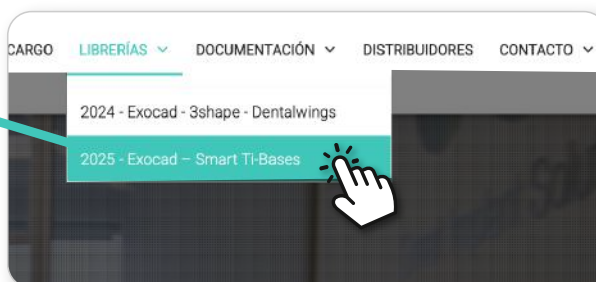

Área privada Exocad librerías Smart Ti-Bases

Para acceder al área de Exocad Librerías para Smart Ti-Bases, debes introducir los siguientes datos:

Nombre \*  
Nombre

Empresa \*  
Empresa

País \*  
País

Correo electrónico \*  
Correo electrónico

Acepto la política de privacidad


Enviar

### PASO 2

Para acceder al área de las Librerías Exocad Smart - Ti-Bases debe rellenar y enviar el formulario.

Una vez rellenado y enviado, espere unos segundos y será dirigido automáticamente al área de las librerías 2025 - Exocad - Smart Ti-Bases.

## ÁREA WEB LIBRERIAS 2025

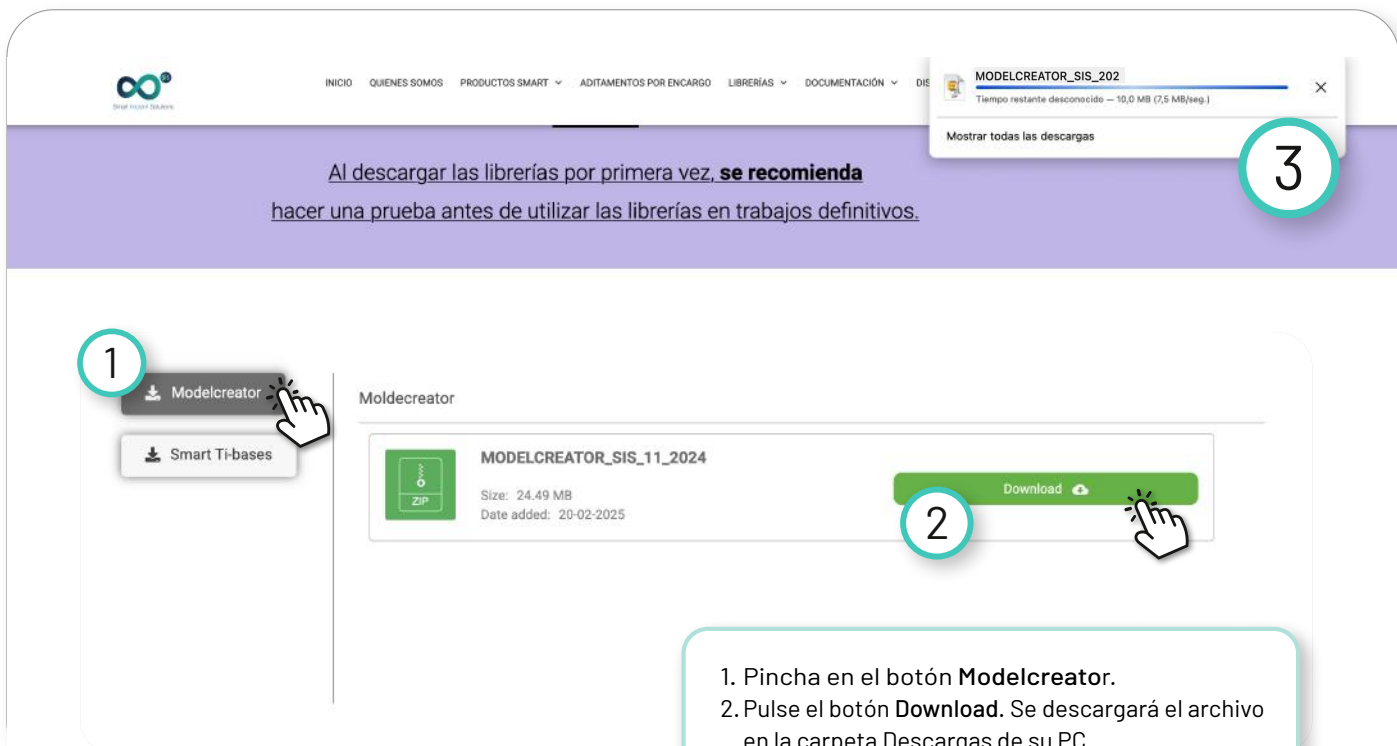

Al descargar las librerías por primera vez, **se recomienda** hacer una prueba antes de utilizar las librerías en trabajos definitivos.

1

Modelcreator

Smart Ti-bases

Moldecreator

MODELCREATOR\_SIS\_11\_2024

Size: 24.49 MB  
Date added: 20-02-2025

2

Download

3

1. Pincha en el botón **Modelcreator**.
2. Pulse el botón **Download**. Se descargará el archivo en la carpeta Descargas de su PC.
3. Visualización de progreso de descarga en el navegador Google Chrome.

## 2. INSTALAR LIBRERÍAS MODELCREATOR

Cuando descomprima el archivo MODELCREATOR\_SIS\_2025.zip  
le saldrá una carpeta que contiene:



### 1. COPIAR CARPETAS

Abra la carpeta "MODELCREATOR\_SIS\_2025.zip"

1. Seleccione y copie todas las carpetas.
2. Péguelas en la siguiente ruta:

`C:/exocad/DentalCADApp/library/modelcreator/implants`

**ATAJO:** A través del navegador de archivos de su ordenador puede buscar rápidamente la ruta que se indica.

`C:/exocad/DentalCADApp/library/modelcreator/implants`

Al instalar nuevas librerías, es imprescindible que el software CAD exocad esté cerrado.

Si ya existen versiones anteriores de las mismas librerías, es recomendable eliminar la carpeta correspondiente antes de pegar las nuevas para evitar conflictos.

### 2. COMPROBACIÓN

Asegúrese que tiene las librerías correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad.

Entre en la **carpeta implants** y localice que estén los archivos copiados.

### 3. EJECUTAR EXOCAD