


1. CÓMO DESCARGAR LAS LIBRERÍAS SMART PARA EXOCAD MODELCREATOR

PASO 1

1. Desde un ordenador, conectarse a: **www.smartimplantsolutions.com**
2. En el menú principal, en el botón **LIBRERÍAS**, pinche en el botón **Exocad - Smart Ti-Bases**.

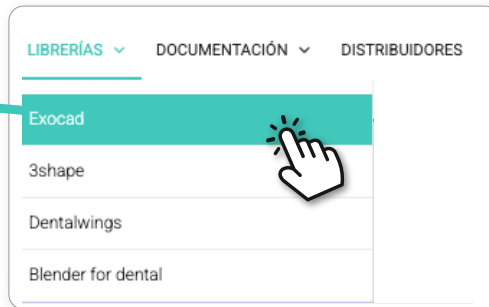

Área privada Exocad librerías Smart Ti-Bases

Para acceder al área de Exocad Librerías para Smart Ti-Bases, debes introducir los siguientes datos.

Nombre *

Empresa *

País *

Correo electrónico *


☒ Acepto la política de privacidad

Enviar

PASO 2

Para acceder al área de las Librerías Exocad Smart - Ti-Bases debe rellenar y enviar el formulario.

Una vez rellenado y enviado, espere unos segundos y será dirigido automáticamente al área de las librerías Exocad - Smart Ti-Bases.

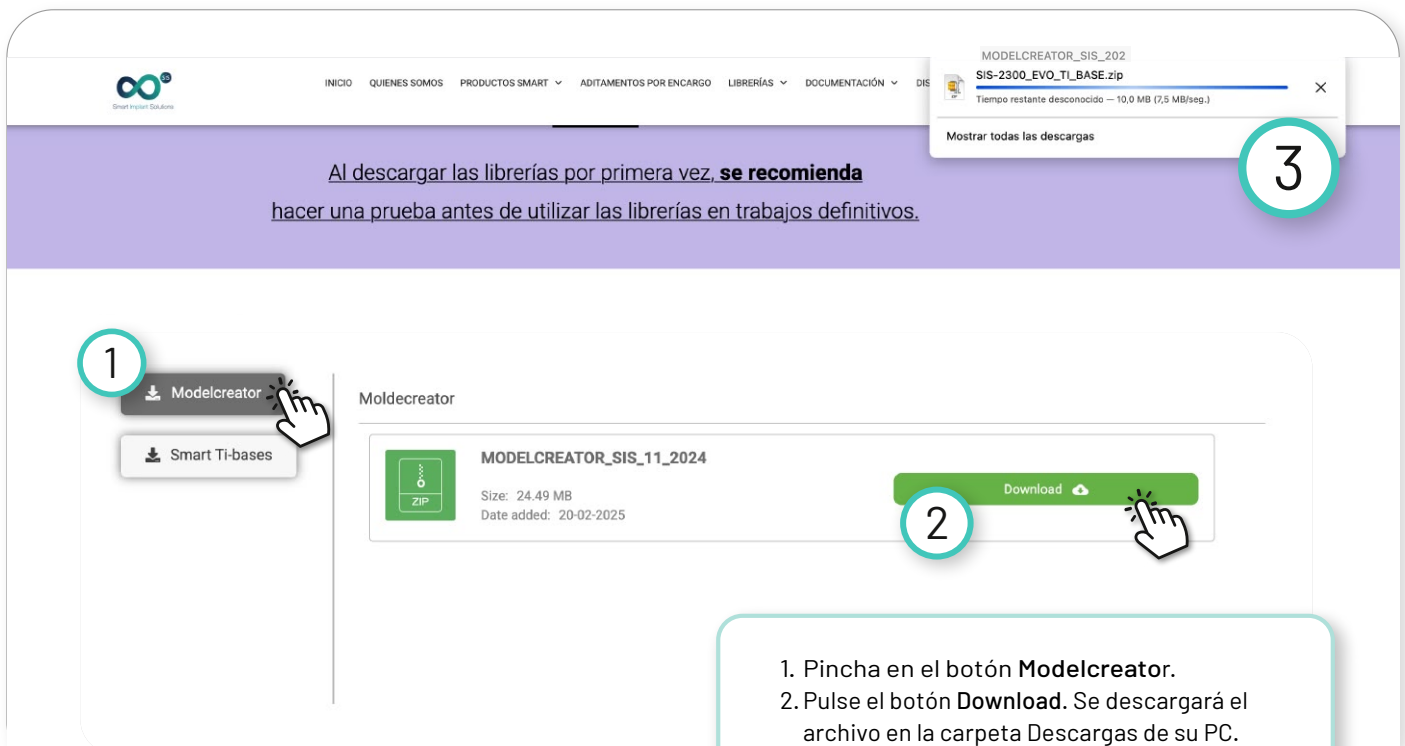

Al descargar las librerías por primera vez, **se recomienda** hacer una prueba antes de utilizar las librerías en trabajos definitivos.

1. Pincha en el botón **Modelcreator**.

2. Pulse el botón **Download**. Se descargará el archivo en la carpeta Descargas de su PC.

3. Visualización de progreso de descarga en el navegador Google Chrome.

2.INSTALAR LIBRERÍAS MODELCREATOR

Cuando descomprima el archivo **MODELCREATOR_SIS_2026.zip**
le saldrá una carpeta que contiene:

✓  **MODELCREATOR_SIS_2026**

>  SIS-0100_BM
>  SIS-0120_BT-EXT
>  SIS-0160_MIS-SVN
>  SIS-0200_3i_EXT
>  SIS-0300_ZI
>  SIS-0400_3i_CE
>  SIS-0500_AS
>  SIS-0600_STR-TL
>  SIS-0700_BT_TL
>  SIS-0800_NB-RP
>  SIS-0900_NB-AC
>  SIS-1000_KL-SK2
>  SIS-1100_STR-BL
>  SIS-1300-MU
>  SIS-1400_SM-PK
>  SIS-1500_PH-TSH
>  SIS-1600-BIO
>  SIS-1800_MIS_C1
>  SIS-2200_NEO
>  SIS-2300_EVO
>  SIS-2400_NE
>  SIS-2500_ME
>  SIS-2600_XI
>  SIS-2700_ANK
>  SIS-2800_OSS
>  SIS-2900_DIO
>  SIS-3000_DEN

1. COPIAR CARPETAS

Abra la carpeta “**MODELCREATOR_SIS_2026.zip**”

1. Seleccione y copie todas las carpetas.
2. Péguelas en la siguiente ruta:

C:/exocad/DentalCADApp/library/modelcreator/implants

ATAJO: A través del navegador de archivos de su ordenador puede buscar rápidamente la ruta que se indica.

C:/exocad/DentalCADApp/library/modelcreator/implants

Al instalar nuevas librerías, es imprescindible que el software CAD exocad esté cerrado.

Si ya existen versiones anteriores de las mismas librerías, es recomendable eliminar la carpeta correspondiente antes de pegar las nuevas para evitar conflictos.

2. COMPROBACIÓN

Asegúrese que tiene las librerías correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad.

Entre en la **carpeta implants** y localice que estén los los archivos copiados.

3. EJECUTAR EXOCAD